

Pulizia e Sanificazione delle Apparecchiature di HME

Bollettino Tecnico | Marzo 2020

Di seguito sono riportate linee guida e raccomandazioni per la pulizia e la sanificazione di routine delle apparecchiature HME. Queste linee guida si applicano solo alle superfici esterne delle apparecchiature e non alle superfici elettriche/ elettromeccaniche interne. Alcune superfici esterne delle apparecchiature potrebbero non essere accessibili, come piccole crepe e fessure, e, pertanto, la sanificazione della superficie totale delle apparecchiature potrebbe non essere raggiungibile.

L'Obiettivo della Sanificazione:

Secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Mallatie (CDC - il suo acronimo in inglese), la "sanificazione" abbassa il numero di germi sulle superfici o sugli oggetti a un livello di sicurezza; non elimina tutti i germi.

A) Sicurezza:

Se possibile, spegnere l'apparecchiatura. Durante la pulizia si devono prendere precauzioni, come ad esempio indossare guanti e garantire una adeguata ventilazione.

B) Non Utilizzare:

Detergenti duri o abrasivi di qualsiasi tipo, in quanto le apparecchiature HME contengono materiali e superfici che possono essere danneggiati o deteriorarsi prematuramente.

Detergenti da evitare:

- Detergente per vetri
- Smalto per unghie o qualsiasi soluzione a base di acetone
- Detergenti a base di ammoniacars
- Detergenti al perossido di idrogeno
- · Detergenti a base di candeggina



- Detergenti abrasivi o a motore
- Salviettine disinfettanti

C) Utilizzare:

Una soluzione di alcool isopropilico in una parte e acqua in una parte (preferibilmente distillata). Una volta che le concentrazioni di alcool scendono sotto il 50%, l'utilità per la sanificazione scende drasticamente. In particolare, le concentrazioni di alcool superiori al 50% non aumentano l'utilità per la sanificazione.

D) Pulizia Adeguata:

- **Spegnere e scollegare** l'apparecchio prima di iniziare la pulizia e pulirlo con un panno in microfibra asciutto per rimuovere polvere e sporcizia.
- **NON spruzzare** nulla direttamente sulle apparecchiature HME.
- **Mentre si pulisce**, la soluzione acqua-isopropilica deve essere sempre spruzzata su un panno in microfibra, e poi strofinato sul dispositivo. Assicurarsi che il panno sia umido ma non bagnato.
- Fare attenzione a non esercitare troppa pressione e utilizzare una pressione regolare e costante per evitare di danneggiare pulsanti, tasti, display o superfici.

E) Ricambio di Parti Accessorie:

- Sostituire eventuali parti in schiuma come i padiglioni auricolari, se necessario. Chiamare il numero sottostante per ordinare.

NOTA:

Questo bollettino tecnico vuole essere una guida pratica per mantenere pulite e igienizzate le apparecchiature HME. HME non dichiara né garantisce che la pulizia e la sanificazione delle apparecchiature HME in questo modo proteggerà l'utente dell'apparecchiatura da virus, batteri o altri agenti patogeni. Le preoccupazioni mediche devono essere indirizzate agli operatori sanitari.

Negli Stati Uniti e in Canada, chiamate il numero 800.848.4468 o il vostro rivenditore autorizzato di HME locale per ulteriori informazioni. Per tutti gli altri paesi, contattate il vostro distributore autorizzato di HME locale.



